


# Montageanleitung

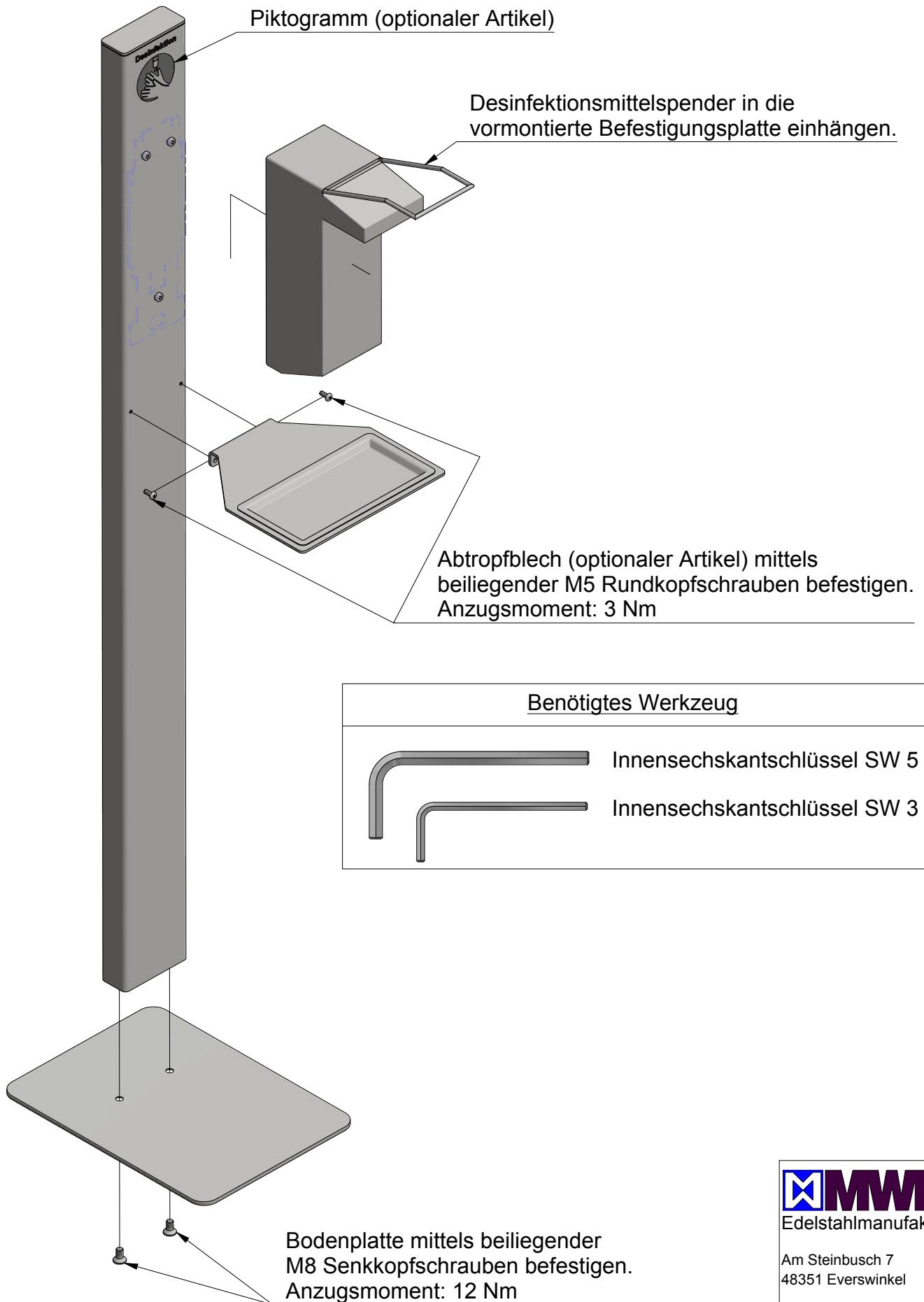


Piktogramm (optionaler Artikel)

Desinfektionsmittelpender in die vormontierte Befestigungsplatte einhängen.

Abtropfblech (optionaler Artikel) mittels beiliegender M5 Rundkopfschrauben befestigen. Anzugsmoment: 3 Nm

## Benötigtes Werkzeug

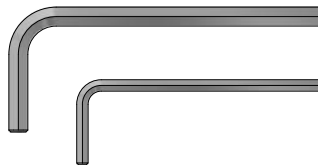

Innensechskantschlüssel SW 5

Innensechskantschlüssel SW 3

Bodenplatte mittels beiliegender M8 Senkkopfschrauben befestigen. Anzugsmoment: 12 Nm

Desinfektionsspender Akzent

**MWE**  
Edelstahlmanufaktur

Am Steinbusch 7  
48351 Everswinkel

Tel.: 02582-9960-0  
Fax: 02582-9960-128

info@mwe.de  
www.mwe.de